

FLUALIV[®]

Spray Nasal



INGREDIENTES:

Xilitol, Cloruro de sodio, Fosfato dibásico de sodio, Fosfato monobásico de sodio, Cloruro de benalconio HCl* y/o NaOH*, Agua purificada.

¿Cuándo usar Flualiv spray nasal?

Flualiv spray nasal debe aplicarse de 2 a 3 veces al día para mantener una barrera eficaz.

¿Quién puede utilizar Flualiv spray nasal?

- Flualiv spray nasal es adecuado para adultos, deportistas, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, y niños a partir de los 18 meses.
- Flualiv spray nasal tiene un buen perfil de seguridad.
- Flualiv spray nasal no produce somnolencia.

¿Cómo funciona Flualiv spray nasal?

Flualiv spray nasal es un aerosol nasal en forma líquida. El líquido crea una barrera para proteger de los alérgenos en el aire.

El bloqueador de alergias Flualiv protege la membrana nasal contra los alérgenos transportados por el aire, que es donde comienza la respuesta alérgica. De esta manera, se evita la desgranulación de los mastocitos y la posterior liberación de IgE e histamina.

Modo de uso:

Paso 1

Sonarse la nariz.



Paso 2

Retire la tapa y agite la botella de lado a lado.



Paso 3

Coloque la boquilla de la botella justo dentro de la nariz y aplique de 1 a 2 pulverizaciones en cada fosa nasal. Inhale suavemente mientras aprieta, pero no inhale profundamente.



Paso 4

Vuelva a aplicar cada vez que se suene la nariz.

Un adulto supervisor puede ayudar a aplicar este producto siguiendo los pasos anteriores.



Si Flualiv spray nasal no alivia adecuadamente sus síntomas

- Lea atentamente la guía anterior y pruebe Flualiv spray nasal siguiendo los 4 pasos anteriores.

Conservación de Flualiv spray nasal

- No enjuague el envase con agua u otro líquido, ya que esto puede bloquear la botella.
- No lo use si el sello de evidencia de manipulación está roto.
- Vuelva a colocar siempre la tapa.
- Mantener en un lugar fresco y seco, no mayor a 30 °C.

- Una vez abierto utilizar en un plazo de 6 meses.

- No refrigerar o congelar.

Contraindicaciones

- No apto para menores de 18 meses.
- No utilice este producto si es sensible a alguno de sus ingredientes.
- Evitar que el producto entre en contacto con los ojos.
- Evite el contacto con heridas abiertas.
- Si el polvo ingresa en los ojos, enjuáguelos con agua.
- Para evitar la contaminación, no use este producto para más de una persona.
- Durante el primer uso, puede experimentar una sensación de hormigueo o ardor en la nariz o estornudos leves. Esta es una sensación pasajera que desaparecerá a medida que se acostumbre a utilizar Flualiv spray nasal.
- También puede sentir algún tipo de irritación, especialmente si su mucosa nasal ya está inflamada o irritada. Esto desaparecerá rápidamente.
- Algunas personas pueden sentir una ligera sensación de nariz tapada, esto es normal y es la sensación de la barrera creada por Flualiv spray nasal. En caso de experimentar más que una leve sensación de nariz tapada, es posible que el producto esté siendo usado en exceso.
- Si experimenta molestias graves después de la aplicación de Flualiv spray nasal, consulte a su médico.
- Si se requiere el uso simultáneo de otro aerosol nasal, luego se debe volver a aplicar Flualiv spray nasal para que no se altere la barrera creada.
- Se han notificado muy pocos casos de reacciones alérgicas a este producto. Los informes menores recibidos han sido congestión nasal, secreción nasal, estornudos, dolor de garganta.

Si experimenta reacciones más graves que estas, debe interrumpir inmediatamente el uso del producto y, si los síntomas persisten, consulte a su médico.

Caja x 1 Frasco x 15 mL de solución + Inserto

ROCIAR

ATRAPAR Y PROTEGER



*Manténgase seco
*Ver inserto/manual de uso adjunto



Farmayala Medicines